



Finns sterilförpackad som kompress och som tamponad.

Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
5x5cm	20 440	10	100
10x10cm	20 441	10	100
10x20cm	20 442	10	100
30cm, 2gram	20 445	5	50

Suprasorb A®

- för måttligt till rikligt vätskande sår

Egenskaper:

- ✓ Mjukt algförband av kalciumalginat med blodstillande effekt.
- ✓ Består av naturliga alginatfibrer, som har en mycket god förmåga att absorbera exsudat och rensa upp sår
- ✓ Kalciumalginatfibrerna reagerar med sårexsudat eller blod och bildar en gel, som ger ett fuktigt sårklimat. Kan absorbera upp till 20 gånger sin egen vikt utan att tappa formen.
- ✓ De mjuka fibrerna är formbara och fastnar inte i såret. Skapar ett idealiskt sårklimat och är mycket lämpligt för kraftigt vätskande, även djupa och infekterade, sår.
- ✓ Vid kompressbyte forcerar de ej fram nya sår eller orsakar smärta och man får bort kompress och tamponad i ett stycke.
- ✓ Kompresser och tamponader är steriliserade med gammastrålning och får inte omsteriliseras. Produkterna är sterila, vid obruten förpackning.

Indikationer:

- ✓ Idealisk för många olika typer av måttligt till rikligt vätskande sår.
- ✓ Även för djupa sår, infekterade sår och för brännskador av 1:a- 2:a graden.
- ✓ Kan användas för behandling av följande sår:
 - Trycksår
 - Arteriella sår
 - Venösa bensår
 - Diabetessår
 - Tagställe vid hudtransplantation om de är kraftigt vätskande

Kontraindikationer:

- ✓ Ej lämpliga vid torra sårförhållanden
- ✓ Ej lämpliga vid brännskador av tredje graden

Biverkningar:

- ✓ Hittills inga kända.

Omlägningsfrekvens:

- ✓ Beroende på såret, mängden sårvätska och täckförbandet, men kan ligga kvar som mest 5-7 dagar.

Material:

- ✓ Består av 100% naturliga brunalger.

Förpackningar:

- ✓ Produktförpackning av cellulosa och polyetylen
- ✓ Avdelningsförpackning och bruksanvisning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras torrt i rumstemperatur upp till 25°C
- ✓ Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt
- ✓ Enligt EN-Standard 13726-1, 3.2

Avfallshantering:

- ✓ Produkten hanteras som brännbart avfall
- ✓ Produktförpackningen hanteras som brännbart avfall
- ✓ Avdelningsförpackningen källsorteras eller hanteras som brännbart avfall
- ✓ Transportkartong källsorteras som kartong

Bruksanvisning

1. Sårförberedelse:

Rengör såret noggrant. Omgivande hud ska vara ren och torr.

2. Applicering av sårförbandet:

a) Placera kompressen på den fuktiga sårbädden.

Behöver ej anpassas efter sårets storlek.

Fukta förbandet med fysiologisk koksaltlösning om såret är svagt vätskande.

b) Tamponera djupa sår försiktigt med tamponaden.

c) Fixera kalciumalginatförbandet med ett lämpligt förband, till exempel med Suprasorb® H hydrokolloidförband.

3. Byte av förband:

Byt förband enligt ordination, eller vid behov. Dock minst var 5-7 dag. Ta bort fixeringen och skölj bort eventuell gel som är kvar i såret med fysiologisk koksaltlösning.

Försiktighetsåtgärder:

Produkten bör ej användas vid känd allergi mot en eller flera av de i produkten ingående komponenterna.

För ytterligare information, var god se bipacksedel.