



MiniCollect® 9NC koagulationsrör

För in vitro-diagnostiskt bruk
Användningsinstruktioner



Användning

MiniCollect® 9NC koagulationsrör är avsett för uppsamling av citratantikoagulerade helblodsprover för koagulationsanalys.

Produktbeskrivning

Dessa MiniCollect®-rör är icke-sterila lågvolumsprovror i plast utan vakuum med inbyggda uppsamlingsenheter. Förslutningen är färgkodad för att identifiera de tillsatser som förekommer i varierande koncentrationer beroende på typen av rör och angivna volymer. Rören är fyllda med en buffrad tri-natriumcitratlösning i en koncentration på 0,109 mol/l (3,2 %).

Rörtyper	Provmaterial	Korkens färg
MiniCollect® 9NC koagulationsrör 3,2 % – endast för venöst blod	Venöst blod	Ljusblå

Produktversioner

MiniCollect®-rör med valfria 13x75 mm ytterrör

MiniCollect®-rör förmonterade med 13x75 mm ytterrör

Förvaring före användning

Rekommenderad förvaringstemperatur: 4–25 °C (40–77 °F). Undvik exponering för direkt solljus. Om den rekommenderade maximala förvaringstemperaturen överskrids kan det leda till att rörkvaliteten försämras (som avdunstning av vätsketillsatser, färg osv.) Alla rören klarar temperaturer ned till –20 °C.

Blodprovstagning och hantering

Utrustning som krävs men inte tillhandahålls

- Etiketter för positiv patientidentifiering av prover
- Handskar och passande klädsel som skyddar mot blodburen smitta
- Akolholtuss
- Torr gasväv
- Förbandsomslag eller plåster
- Avfallsbehållare för potentiellt smittförande material
- Överföringsenhet utan kanyl
- Enhet och tillbehör för uppsamling av venöst blod

Avtagning av kork

Det räfflade området kring rörets topp anger var korken ska öppnas. Ta av korken genom att trycka den försiktigt uppåt. Triangeln anger motsatt position mot skopan.

Blodprovstagning

För venblodsprovtagning, följ din institutions policyer. Provet ska därefter överföras till röret med ett säkert system utan kanyl (exempelvis en plastspruta).

Allmän hantering

Låt bloddropparna rinna fritt in i och nedför insidan av MiniCollect®-röret. Knacka röret varsamt mot en hård yta om en droppe fastnar inuti skopan eller för att blanda innehållet under uppsamlingen. Skaka inte och ryck inte i rören. Observera fyllnadslinjen för korrekt fyllning av rören. Efter uppsamling, förslut röret med den ursprungliga korken. Ett hörbart klick anger korrekt förslutning. Invertera 4–5 ggr tills blodet är fullständigt blandat med tillsatsen. Kraftig skakning kan leda till skumbildning och hemolys. Patienten och patientens blodprov måste identifieras vid provtagningstillfället. Provet måste etiketteras omedelbart efter uppsamling och blandning.

Centrifugering

Kontrollera att rören är korrekt placerade i centrifugens insatser. Rekommendationen för MiniCollect®-rör är en centrifugering vid 3000 g i 10 minuter. Centrifugeringen ska genomföras vid en temperatur på 15 °C–24 °C (25 °C/77 °F). Rören bör inte omcentrifugeras när barriären har bildats. Andra centrifugeringstillställningar kan också ge acceptabel separation. Med en "swing-out"-rotor i centrifugen erhålls en stabilare gelbarriär jämfört med en vinkelrotor i centrifugen.

Avfallshantering

- Följ de allmänna hygienriktlinjerna och rättsliga bestämmelserna för korrekt kassering av smittförande material.
- Använd alltid handskar vid bloduppsamling och -kassering.
- Kontaminerade eller fyllda blodprovstagningsrör ska samlas i lämpliga avsedda avfallsbehållare för potentiellt smittförande material, som därefter kan autoklaveras och destrueras.

Provstabilitet och -förvaring

Information om rätt provmaterial, förvaringsförhållanden och stabilitet finns i instrumentets analysanvisningar eller litteratur.

Försiktighetsåtgärder/Varningar

- Otillräcklig eller försenad blandning i rör med tillsatser kan leda till koagulation och/eller felaktiga testresultat.
- Rören får inte användas om de innehåller främmande partiklar.
- Hantera alla biologiska prover och bloduppsamlingsenheter enligt din institutions policyer och procedurer.
- Sök lämplig medicinsk vård i händelse av exponering för biologiska prover.
- Kontrollera alla rör före användning för att kontrollera utgångsdatum och att rätt produkt används. Rören får inte användas efter utgångsdatum.
- Laboratoriet är ytterst ansvarigt för att ett byte från en rörtillverkare till en annan inte påverkar patientprovernas analysresultat.
- Endast för engångsbruk

Märkning på produktetiketter

	Art.nr		Temperaturgräns	Litteratur GP41-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic. Blood Specimens by Venipuncture; Approved. Standard-Sixth Edition. GP42-A6 Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-Sixth Edition. H21-A5 Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostasis Assays; Approved Guideline-Fifth Edition.
	LOT-nummer: Batchnummer		In vitro-diagnostisk enhet	
	Utgångsdatum		Läs bruksanvisningen	
	Får ej återanvändas		Tillverkare	
Endast mot recept	Receptbelagd produkt			



Greiner Bio-One GmbH
Bad Haller Straße 32
A-4550 Kremsmünster
ÖSTERRIKE

www.gbo.com/preanalytics
faq.pa@gbo.com
(+43) 07583/6791